고해상도(4K) 모니터에서 프로그램이 작게 나올 때 해결방법

- 1. 이지캠 바로가기 아이콘에서 마우스 오른쪽 버튼을 누릅니다.
- 2. 메뉴에서 속성으로 들어갑니다.

	열기(0)	P.
	파일 위치 열기(1)	
•	관리자 권한으로 실행(A)	
	后用/禁用数字签名图标	
	호환성 문제 해결(Y)	
	시작 화면에 고정(P)	
0	EzTTS.zip으로 압축하기(Q)	
0	EzTTS.7z로 압축하기(7)	
0	반디집으로 압축하기(L)	
0	반디집으로 열기	
	Windows Defender(으)로 검사	
	작업 표시줄에 고정(K)	
	이전 버전 복원(V)	
	보내기(N)	>
	잘라내기(T)	_
	복사(C)	
	바로 가기 만들기(S)	
	삭제(D)	
	이름 바꾸기(M)	
	솔석(B)	

3. 호환성 탭으로 들어간 뒤 하단 쪽에 "높은 DPI 설정 변경"을 클릭합니다.



4. 다음 나오는 화면에서 아래 그림에 붉은 색으로 표시한 부분을 체크 해줍니다.

EzCam 속성	×
이 프로그램에 대한 높은 DPI 설정을 선택하세요.	
프로그램 DPI	
이 설정을 사용하여 설정에 있는 크기 조정 다 크기 조정 문제를 해결하세요.	i신 이 프로그램의
고급 크기 오징 열정 열기	
Windows에 로그인한 후 기본 디스플레이의 DPI 그램이 흐리게 보일 수 있습니다. Windows는 이 기본 디스플레이에 설정된 DPI를 사용하여 이 프 정 문제를 해결할 수 있습니다.	가 변경되면 프로 프로그램을 열 때 로그램의 크기 조
다음과 같은 경우에 내 메인 디스플레이에 설정된	린 DPI를 사용
Windows에 로그인했을 때	e
자세한 정보	
높은 DPI 조정 재정의	
□ 높은 DPI 조정 동작을 재정의합니다. □ 조정한 사람:	
응용 프로그램	
확인	취소

5.아래 그림에 붉은 색으로 표시한 부분을 클릭하여 "이 프로그램을 열 때"로 바꿔 줍니다.

EzCam 속성	×
이 프로그램에 대한 높은 DPI 설정을 선택하세요.	
프로그램 DPI	
✓ 이 설정을 사용하여 설정에 있는 크기 조정 대신 이 3 램의 크기 조정 문제를 해결하세요. 고급 크기 조정 설정 열기	프로그
Windows에 로그인한 후 기본 디스플레이의 DPI가 변경 프로그램이 흐리게 보일 수 있습니다. Windows는 이 프 을 열 때 기본 디스플레이에 설정된 DPI를 사용하여 이 램의 크기 조정 문제를 해결할 수 있습니다.	되면 로그램 프로그
다음과 같은 경우에 내 메인 디스플레이에 설정된 DPI를	사용
Windows에 로그인했을 때 🗸	
Windows에 로그인했을 때	
이 프로그램을 열 때	
높은 DPI 조정 재정의	
□ 높은 DPI 조정 동작을 재정의합니다. 조정한 사람:	
응용 프로그램	
확인 취	소

6. "높은 DPI 조정 동작을 재정의합니다."를 체크합니다.



7. 아래 그림에 붉은 색으로 표시한 부분을 클릭하여 "시스템"으로 바꿔줍니다.

EzCam 속성	×
이 프로그램에 대한 높은 DPI 설정을 선택	하세요.
프로그램 DPI	
○ 의 설정을 사용하여 설정에 있는 크기 크기 조정 문제를 해결하세요. 고급 크기 조정 설정 열기	기 조정 대신 이 프로그램의
Windows에 로그인한 후 기본 디스를레 그램이 흐리게 보일 수 있습니다. Windo 기본 디스클레이에 설정된 DPI를 사용히 정 문제를 해결할 수 있습니다.	이의 DPI가 변경되면 프로 ows는 이 프로그램을 열 때 하여 이 프로그램의 크기 조
다음과 같은 경우에 내 메인 디스플레이	l에 설정된 DPI를 사용
이 프로그램을 열 때	~
자세한 정보	
높은 DPI 조정 재정의	
☑ 높은 DPI 조정 동작을 재정의합니다. 조정하 사랑·	
응용 프로그램	~
응용 프로그램	
시스템(고급)	취소

8. 모두 마쳤으면 확인을 클릭한 뒤 처음에 열렸던 속성창에서도 확인을 눌러주면 됩니다.